


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO


Leia com atenção as instruções de instalação:

- A fixação deste produto deverá ser feita por um profissional qualificado;
- Ao instalar, cuidado com tubulações hidráulicas e elétricas;

- Com o auxílio da barra de apoio, faça as marcações em seus respectivos furos. Utilize uma caneta marcadora ou esferográfica para realizar essa marcações

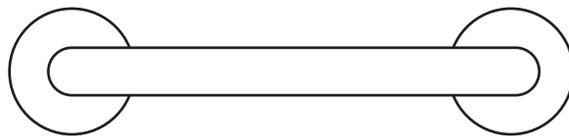

Desenho para orientação

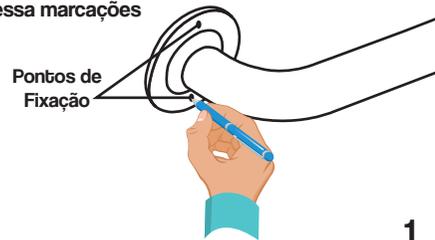

1


- Utiliza brocas de 8mm (vidia) para fazer a perfuração;

Pontos de Fixação



Desenho para orientação

- Coloque as buchas em seus respectivos furos, faça o posicionamento da barra de apoio na parede e rosqueie os parafusos para fixar. Utilize uma parafusadeira para auxiliar no trabalho;

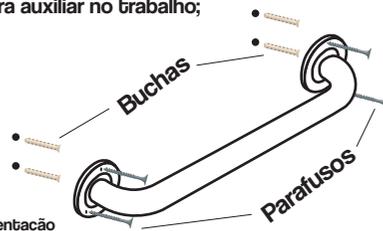

Desenho para orientação



3

- Para se certificar que a barra de apoio está bem fixada, force-a para baixo e puxe em direção ao seu corpo;



4

- Ao fazer a instalação como puxador nas portas e janelas de aço ou madeira, será necessário fazer a adequação dos parafusos de fixação;
- Ao fazer a instalação como puxador nas portas, não fazer utilização de furadeira, usar somente o próprio parafuso, para que tenha uma melhor fixação;

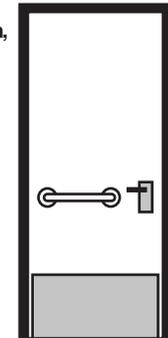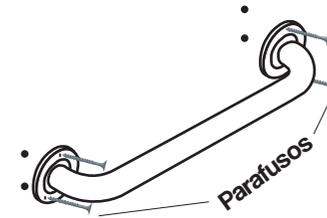

5

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

- Ao realizar a limpeza deste produto, utilize um pano macio, água e sabão neutro, para que a peça seja higienizada. Realizar essa tarefa pelo menos uma vez por semana;
- Não utilizar produtos químicos, palha de aço nem saponáceos



6

TERMO DE GARANTIA

As barras de apoio da Total Acessibilidade possuem 5 anos de garantia, contra possíveis defeitos de fabricação, sendo de responsabilidade da Total Acessibilidade somente a troca da mercadoria. A garantia tem validade a partir da data de compra, com comprovação através de Nota Fiscal.


A Garantia não se aplica nas seguintes situações:

- Produto danificado pela instalação ou uso;
- Instalações realizadas de forma incorreta ou erro de especificação
- Danos causados por produtos químicos, corrosivos, solventes, amassados, quedas, batidas e em ambientes com muita atividade agressiva.

7


BACIA SANITÁRIA

Bacias sanitárias com parede lateral

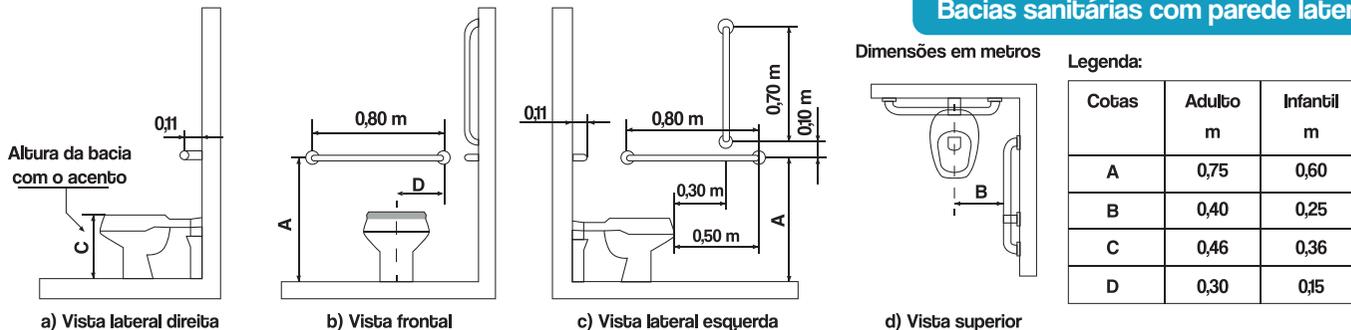


Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral

Bacias com caixa acoplada com parede lateral

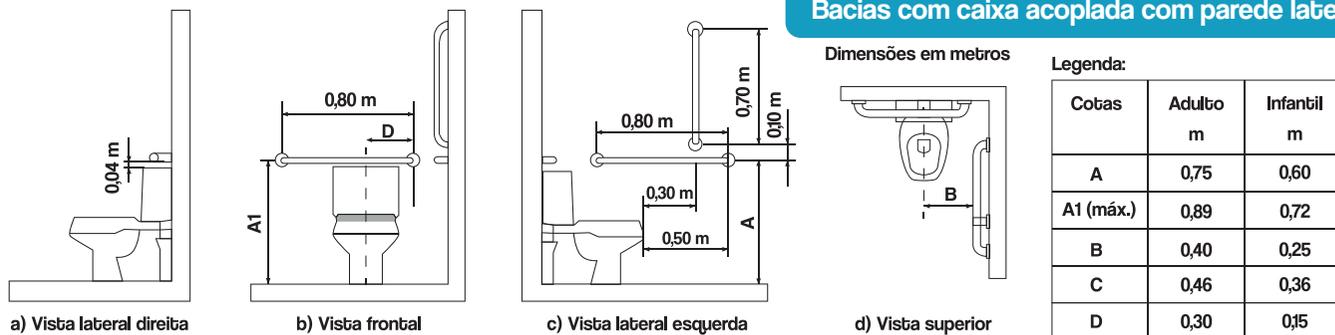


Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral

Barras de Apoio para Lavatório

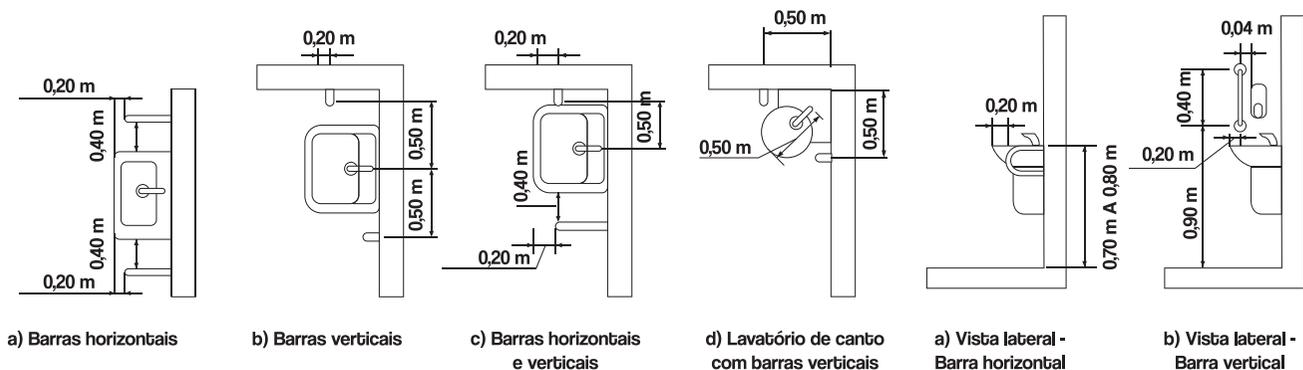


PORTAS DE SANITÁRIO

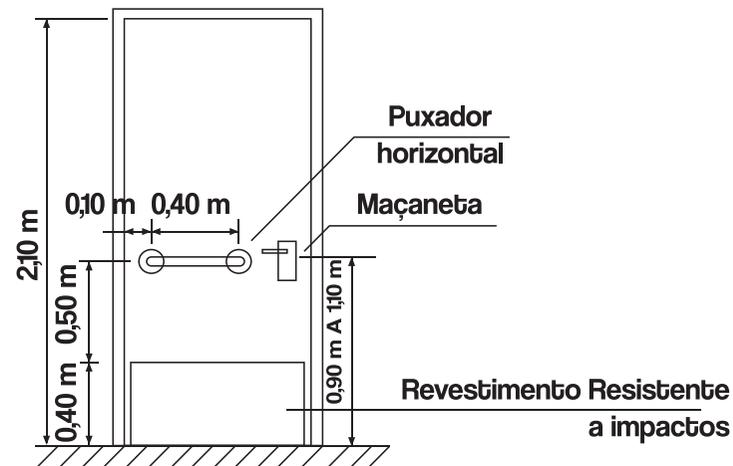

Lado Interno do Sanitário

BARRAS DE APOIO EM BOXES PARA CHUVEIRO

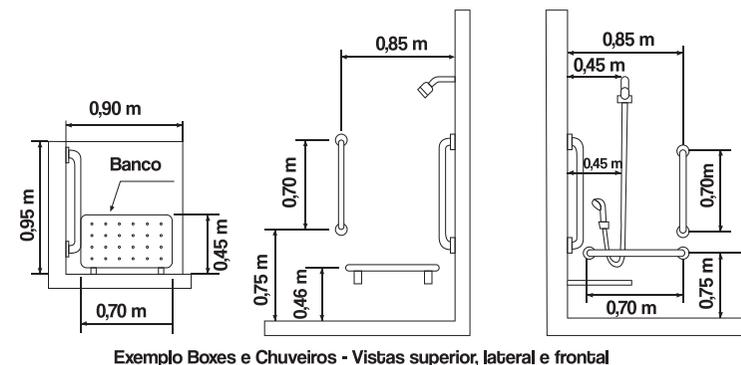

Dimensões em metros

