


## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO


Leia com atenção as instruções de instalação:

- A fixação deste produto deverá ser feita por um profissional qualificado;
- Ao instalar, cuidado com tubulações hidráulicas e elétricas;
- Com o auxílio da barra de apoio, faça as marcações em seus respectivos furos. Utilize uma caneta marcadora ou esferográfica para realizar essa marcações

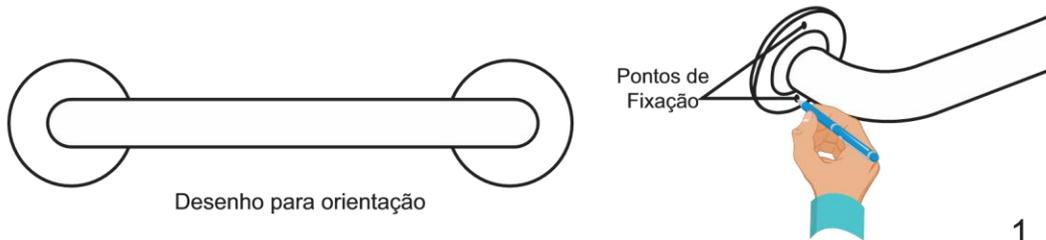


- Utiliza brocas de 8mm (vidia) para fazer a perfuração;



- Coloque as buchas em seus respectivos furos, faça o posicionamento da barra de apoio na parede e rosqueie os parafusos para fixar. Utilize uma parafusadeira para auxiliar no trabalho;

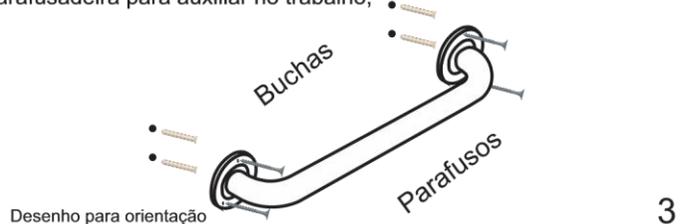

- Para se certificar que a barra de apoio está bem fixada, force-a para baixo e puxe em direção ao seu corpo;

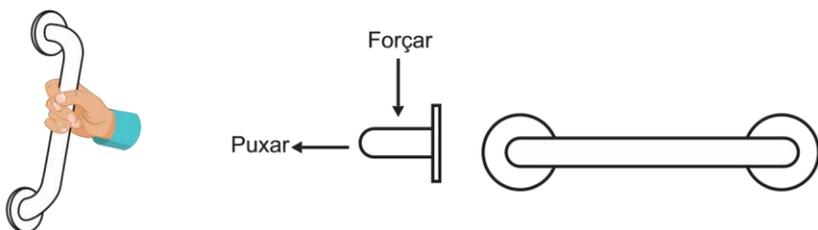

- Ao fazer a instalação como puxador nas portas e janelas de aço ou madeira, será necessário fazer a adequação dos parafusos de fixação;
- Ao fazer a instalação como puxador nas portas, não fazer utilização de furadeira, usar somente o próprio parafuso, para que tenha uma melhor fixação;

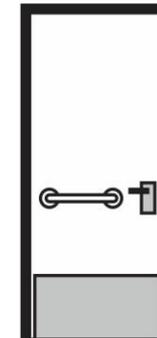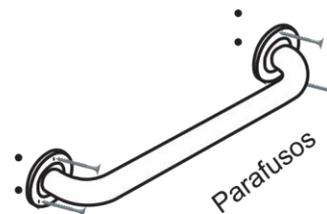

5

## MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

- Ao realizar a limpeza deste produto, utilize um pano macio, água e sabão neutro, para que a peça seja higienizada. Realizar essa tarefa pelo menos uma vez por semana;
- Não utilizar produtos químicos, palha de aço nem saponáceos



## TERMO DE GARANTIA

As barras de apoio da Total Acessibilidade possuem 1 ano de garantia, contra possíveis defeitos de fabricação, sendo de responsabilidade da Total Acessibilidade somente a troca da mercadoria. A garantia tem validade a partir da data de compra, com comprovação através de Nota Fiscal.

A Garantia não se aplica nas seguintes situações:


- Produto danificado pela instalação ou uso;
- Instalações realizadas de forma incorreta ou erro de especificação
- Danos causados por produtos químicos, corrosivos, solventes, amassados, quedas, batidas e em ambientes com muita atividade agressiva.

7




## BACIA SANITÁRIA

### Bacias sanitárias com parede lateral

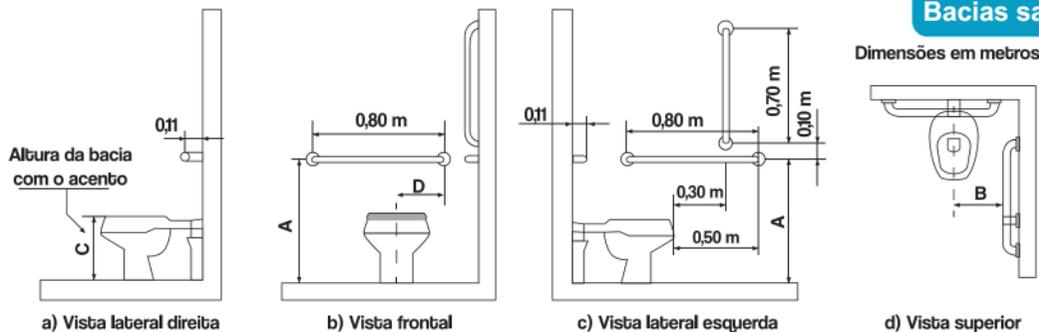


Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral


### Bacias com caixa acoplada com parede lateral

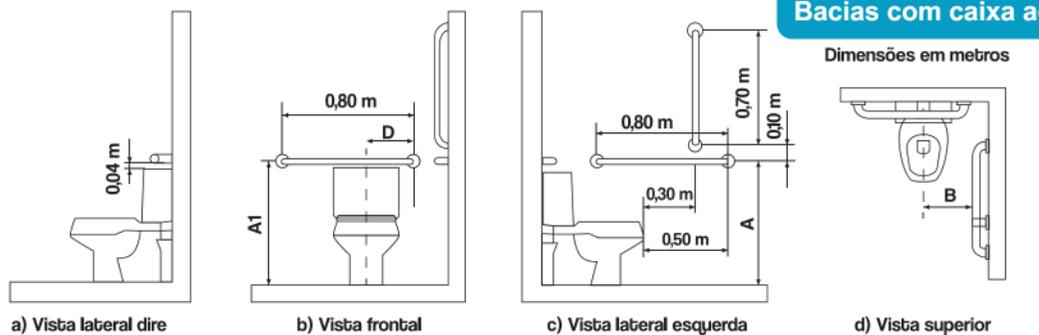

Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral

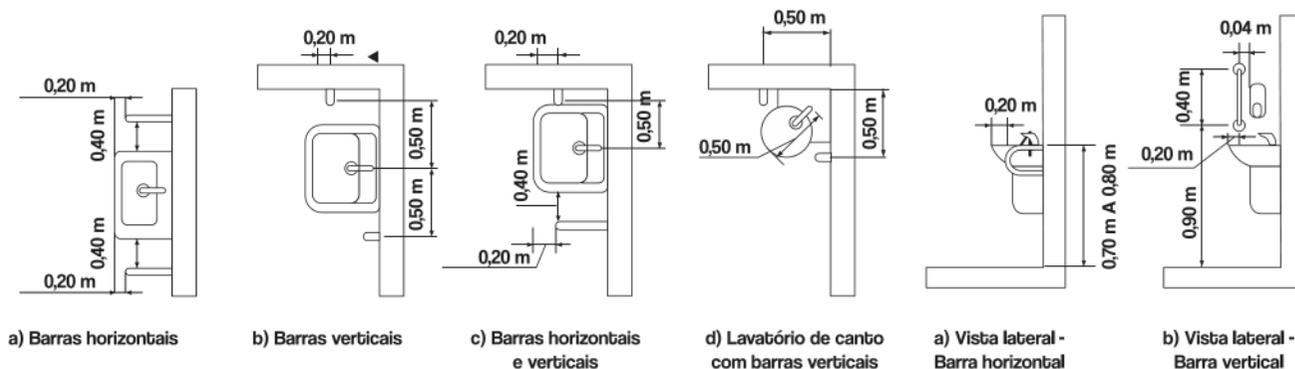


## PORTAS DE SANITÁRIO

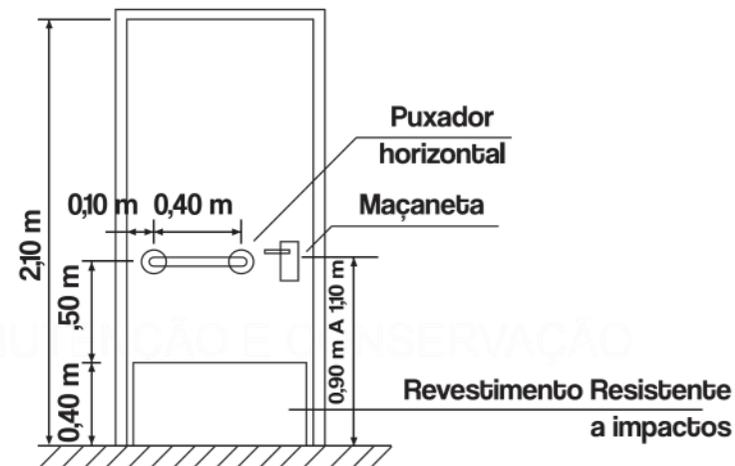

### Lado Interno do Sanitário

## BARRAS DE APOIO EM BOXES PARA CHUVEIRO

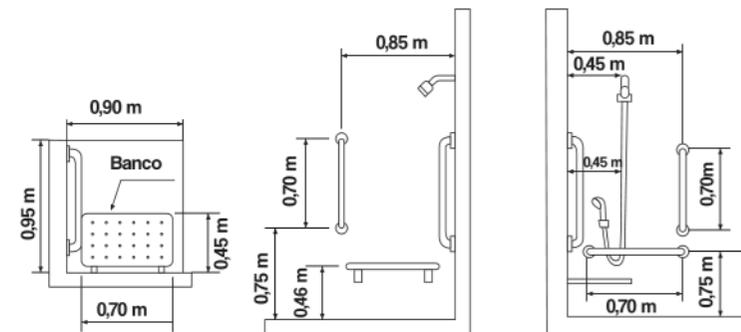

Exemplo Boxes e Chuveiros - Vistas superior, lateral e frontal

Dimensões em metros

